



Artikelnummer 1000021285

ABENA®

Allt-i-ett tejp, ABENA Slip Premium, M2, blå färgkod

- ✓ Högpresterande kärna med Top-Dry-teknik
- ✓ 360-graders läckageskydd som förhindrar läckage runt om
- ✓ Böjda benresår för optimal passform
- ✓ Våtindikator med graderingsskala
- ✓ 100 % andningsförmåga för frisk hud och optimal komfort
- ✓ Odörsystem minimerar oönskad lukt
- ✓ Svanenmärkt och certifierad och dermatologiskt testad



Produktbeskrivning

ABENA Slip är vår Premium-serie av fullt andningsbara, anatomiskt formade tejpskydd för måttlig till kraftig inkontinens. Den högpresterande kärnan med Top-Dry-teknik säkerställer snabb absorption och en torr yta även efter flera läckage. En kombination av olika barriärer (synliga och osynliga) och resår (böjda benresår) ger ett 360-graders läckageskydd runt hela produkten. När de kombineras hjälper dessa funktioner till att skydda huden och upprätthålla en naturlig hudbalans. Odörsystemet minimerar oönskad lukt. Kombitejpen håller hög kvalitet med dubbel tejpfunktion och gör det enkelt att justera skyddet tills det sitter säkert och bekvämt. Våtindikatorn med graderingsskala vägleder till rätt absorptionsnivå och underlättar produktbyten. De dermatologiskt testade skydden är certifierade med Nordiska Svanenmärket.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Allt-i-ett tejp
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Slip Premium
Storlek	M2
Färg	Vit
Funktioner	Blå färgkod
Material	ECF-fluff, elastisk kombitejp, PE, Andningsbar textil baksida (BTBS), elastan, nonwoven, PP, harts, SAP
Längd/djup	840 mm
Bredd	670 mm
Höftmått	70-110 cm
Tolerans	+/- 10%
Absorption (Rothwell)	2672 ml
Praktisk absorption	891 ml
Kön	Unisex
Märkningar	CE. Svanenmärket. MD. UKCA.
Svanenmärkets licensnr.	5023 0001
CE-klass	Klass I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001

Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Säkerhetsanvisningar och varningar	Förvaras utom räckhåll för barn.
Hållbarhetstid	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Tejpskydd för måttlig till kraftig inkontinens utformade för mycket krävande situationer och för sängliggande patienter. Igenkänning av produktstorlek med färgkoder, namn- och numreringssystem. Det är viktigt att alltid mäta höftomfånget för att välja rätt storlek och att välja rätt absorptionsnivå för att undvika läckage. Vik skyddet på längden med spärrskiktet vänt utåt för att skapa en skålform. För skyddet framifrån och bak. Vik ut framsidan av skyddet för att skapa en kanalform mellan benen. Fäst de nedre tejperna vinklade något uppåt på båda sidor och fäst sedan de övre tejperna vinklade nedåt för en säker och bekväm passform. Du kan applicera produkterna i upprätt läge (både självständigt eller med hjälp) och liggande läge. Se användarguiden i vår broschyr för detaljerad information.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	4 fp	57.6 cm	40 cm	36.7 cm	5713571000137
fp	24 st	37 cm	17.5 cm	24.5 cm	5713571000120



Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



UKCA-märkningen garanterar att en produkt är säker att använda samt att den efterlever alla säkerhetsåtgärder i linje med produktstandarder och lagstiftning i Storbritannien.



360-gradiga läckagespärrar i grenen och runt den absorberande kärnan, hjälper till att förhindra läckage och ger en optimal passform.



Produkten har flexibel tejp för att säkerställa bästa möjliga kombination av komfort, passform och läckageskydd. Den blå dubbeltejpen garanterar en extra möjlighet till ompositionering/justering.



Din garanti att våra produkter blivit testade mot ingredienser vilka potentiellt kan orsaka hudirritation. Tester genomförda av ett oberoende tredjepartslaboratorium.



Den unika strukturen i vår högpresterande kärna är designad för snabb spridning och inkapsling av urin, vilket resulterar i en torr yta även efter flera miktioner.



Odörkontroll är mycket viktigt för att säkerställa diskret användning. ABENAs inkontinensprodukter är designade och konstruerade för att säkerställa att minimal lukt uppstår från produkten.



Produkten är fullt andningsbar, vilket gör den bekväm att använda under längre tid. Hjälper till att bibehålla hudens integritet.



Vätindikatorn är en fuktkänslig remsa som ändrar färg eller bleknar bort för att indikera när det är dags att byta produkt.



En kombination av 100 % andningsförmåga, Top-Dry och läckageskydd ger en torr yta och frisk hud även efter flera miktioner. Det hjälper till att bibehålla hudens naturliga pH-balans.



Produkten innehåller inte latex.



Droppsystem som visar absorptionsförmåga. Ju fler droppar, desto högre absorption. Skala från 1 till 9 droppar.



Unik Top-Dry Teknologi som ger snabb absorption och säkerställer en torr yta även efter flera urineringsar.



Påsen med denna symbol är tillverkad av minst 60 % PCR-plast (återvunnen konsumentplast), som tidigare använts av konsumenterna. Detta gör att vi kan minska vårt plastavfall och hjälpa till att ta hand om miljön.

