



Artikelnummer 1010002058

ABENA®

Suturtejp, ABENA, 75x6mm, brun, Ark med 3 remsor, latexfria, sterila, engångsanvändning

- ✓ Neutral diskret färg
- ✓ Andningsbart material



Produktbeskrivning

Flexibel suturtejp som kan användas för att tejpa sårkanter som ett alternativ till suturering eller limning. Kan även användas för att stabilisera sår i kombination med suturer, och när stygnen tas bort främjas läkningen då suturtejpen håller ihop sårkanterna.



STERILE

Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Suturtejp
Varumärke	ABENA
Färg	Brun
Funktioner	Ark med 3 remsor, latexfria, sterila
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångsanvändning
Längd/djup	75 mm
Bredd	6 mm
Steriliseringssmetod	EO
Märkningar	CE. MD.
CE-klass	Klass IIa
Direktiv, förordningar och lagstiftning	93/42/EEC

Bruksanvisning

Applivering: Torka huden runt såret och börja med att försiktigt applicera suturtejp på mitten av såret. Tryck försiktigt ändarna på plats med fingrarna. Försätt sedan med följande suturtejprensor från mitten och ut mot varje sida. Borttagning: Lossa ena änden av tejen samtidigt som du trycker på mitten med den andra handen. Ta försiktigt och långsamt bort tejen. Suturtejpen rekommenderas tas bort i hårväxtens riktning för att undvika smärta och obehag för patienten. Använd inte suturtejp i mer än sju dagar. Vid infektion runt suturtejpen måste suturtejpen tas bort omedelbart och sårområdet behandlas enligt gällande kliniska riktlinjer.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	16 fp	26.5 cm	15.5 cm	15 cm	6937935329842
fp	70 ark	13.6 cm	7.4 cm	3.4 cm	6937935329422
ark	1 ark				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Produkten innehåller inte latex.

STERILE

Produkten är steril

