



Artikelnummer 1999911959

ABENA®

Fixeringsbody, ABENA Fix Bodystocking, XL, vit, blixtlås i benutskärning och axelsöm, sömlös

- ✓ Bomullsbaserad mjuk, andningsbar kroppsstrumpa för fixering av en inkontinensprodukt
- ✓ Dragkedjor i ben, gren och axel för enkel applicering och justering
- ✓ Singelförpackad"



Produktbeskrivning

Produkt i tyg för fixering av inkontinensskydd, tas på som en body. ABENA Fix Bodystocking är en mjuk och smidig body tillverkad i bomull med ärmor och ben. Bomullsmaterialet transporterar bort fukt från huden, så att användaren hela tiden känner sig torr och bekväm. Diskreta dragkedjor vid ben, gren och axlar underlättar på- samt avtagning och justeringar. Dragkedjan är täckt, vilket skyddar huden mot irritation. Storlek och tvättråd anges på plaggets tvättrådetikett. ABENA Fix Bodystocking har en färgkod på kragen för enkel produktidentifiering. Och på förpackningen finns det också information om produktnamn, storlek, tvättråd och materialsammansättning. Tillverkad i 75 % bomull, 20 % polyamid och 5 % elastan.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Fixeringsbody
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Fix Bodystocking
Storlek	XL
Färg	Vit
Funktioner	Blixtlås i benutskärning och axelsöm, sömlös
Material	Bomull, elastan, PA
Ingredienser/sammansättning	75 % bomull, 20 % polyamid, 5 % elastan
Höftmått	95-120 cm
Kön	Unisex
Märkningar	CE. OEKO-TEX. MD. UKCA.
OEKO-TEX licensnr.	6234-7001 DTI
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Hållbarhetstid	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus.
Tvättråd	Kan tvättas i upp till 90°C, men bästa hållbarhet uppnås vid 60°C tvätt. Torktumla med skonsamt program. Kan tvättas ca 80 gånger. Stäng dragkedjorna före tvätt. Placera dragkedjans handtag där den är helt täckt av tyget, i änden på dragkedjan. 8 % krympning. Tvättas med fördel i tvättpåse för att ytterligare förlänga hållbarheten. Användning av blekmedel kan påverka produktens hållbarhet.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Body i tyg för fixering av ett inkontinensskydd, tas på som en body. Det är viktigt att välja rätt höftstorlek för bekväm användning. Bästa hållbarhet uppnås vid tvätt i 60 °C. Stäng dragkedjorna före tvätt. Placera dragkedjans handtag där den är helt täckt av tyget, i änden på dragkedjan. Utsätt inte produkten för tryck som mangling eftersom detta kan skada dragkedjorna.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	12 st	40 cm	29.8 cm	25.4 cm	5703538475504
st	1 st				5703538475498



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



UKCA-märkningen garanterar att en produkt är säker att använda samt att den efterlever alla säkerhetsåtgärder i linje med produktstandarder och lagstiftning i Storbritannien.



OEKO-TEX, även kallat "Tilltro till Textiler", är en hälso- och miljömärkning som används över hela världen. Certifieringen intygar att textilier inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön.



Produkten innehåller inte latex.



Produkten kan tvättas i högst 60 grader.



Tål ej blekning.



Tål torktumling på låg värme.



Tål ej strykning.



Kemtvätta inte produkten.



Produkten kan tvättas upp till 80 gånger.



Enkel och säker stängning med dragkedja istället för knappar. Designad för snabb åtkomst och förbättrad komfort.



Sömlös design för extra komfort och flexibilitet. Inga sidosömmar innebär mindre irritation och mer hållbarhet.